



HILARY® FRÜH

Schwangerschaftsdirekttest


PROVOĐENJE TESTA

METODA SREDNJEG MLAZA

1. U cilju korištenja, izvadite test iz ambalaže.
Naputak: Ukoliko ste test čuvali na hladnom mjestu, prije uporabe test mora postići okolnu temperaturu.
2. Odstranite kapicu s testa, kako biste mogli vidjeti usisni štapić.
3. Test držite za držaljke, usisni štapić mora pokazivati nadalje.
4. Usisni štapić u trajanju od oko 5 sekundi držite izvavno u mlaz mokraćne. Usisni štapić kompletno mora biti navlažen mokraćom.
5. U cilju dobijanja korektnog rezultata, stavite test (s displejom za rezultat nagore) na ravnu površinu. U displeju za rezultat postaju vidljive linije boje pink/ružičaste boje.
6. Iščitajte rezultat nakon 5 minuta.

METODA URANJANJA


1. Sakupite mokraćne u čistoj, suhoj posudi.
2. U cilju korištenja, izvadite test iz ambalaže.
Naputak: Ukoliko ste test čuvali na hladnom mjestu, prije uporabe test mora postići okolnu temperaturu.
3. Odstranite kapicu s testa, kako biste mogli vidjeti usisni štapić.
4. Usisni štapić u trajanju od oko 5 sekundi umočite u posudu s mokraćom. Usisni štapić kompletno mora biti navlažen mokraćom.
5. U cilju dobijanja korektnog rezultata, stavite test (s displejom za rezultat nagore) na ravnu površinu. U displeju za rezultat postaju vidljive linije boje pink/ružičaste boje.
6. Iščitajte rezultat nakon 5 minuta.

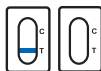

ralo da Vi i Vaša beba budete zdravi.

3. Nevrijedeći rezultat

Rezultat ne vrijedi, ako se u roku od 5 minuta ne pojavi kontrolna linija pink/ružičaste boje (C). Kod nevrijedećeg rezultata ili se Vi niste dostatno pažljivo pridržavali naputaka, ili test ne funkcionira ispravno. Ponovite pretragu s pomoću novog testa. Ukoliko problem i dalje postoji, molimo Vas kontaktirajte lokalno nadležno prodajno mjesto i/ili Vašeg liječnika.

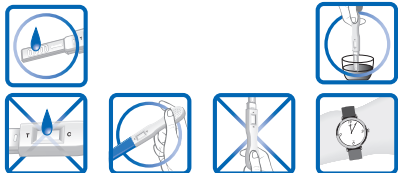

EVALUACIJA REZULTATA



1. Negativno

Pojavljuje se kontrolna linija pink/ružičaste boje (C), ali se ne pojavljuje pokusna linija pink/ružičaste boje (T). To znači, da niste zatrudnjeni.

Naputak: Ukoliko u roku od tjedan dana ne dobijete menstruaciju, ponovite test. Ako ponovno dobijete negativan rezultat, obratite se svome liječniku.



2. Pozitivno

Pojavljuju se kontrolna linija pink/ružičaste boje (C) i pokusna linija pink/ružičaste boje (T). To znači, da ste zatrudnjeni.

Jedna linija može biti jača/slabija odnosno intenzivnija nego ona druga, ali je uvijek pink/ružičaste boje. Trebali biste vidjeti dvije jasne paralelne linije. Pokusna linija (T), posebno u ranoj fazi dokazivanja trudnoće i kod koncentracije hCG manjom od 25 mIU/mL, može biti vrlo slabo izražena.

Naputak: Molimo kontaktirajte liječnika i obavjestite ga o Vašoj trudnoći, kako biste s njim dogovorili slijedeće korake. Rani prijelazi nakon začeća su bitni kako bi se osiguro

Vertrieb und Service in Deutschland:

DOLORGIE T GmbH u. Co. KG
Otto-von-Guericke-Str. 1
53757 Sankt Augustin/Bonn
Telefon: +49 (0)22 41 - 31 70
Telefax: +49 (0)22 41-31 73 90
E-Mail: info@dologiet.de
Internet: www.dologiet.de

Humasis Co., Ltd. · Rm.504, SHINWON VISION TOWER
898 Hoge-dong, Dongan-gu,
Anyang-si, Gyeonggi-do,
431-836, KOREA
Tel.: +82 (0) 31478-85 91
Fax: +82 (0) 31478-85 86
E-mail: question@humasis.com
Internet: www.humasis.com

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstraße 80
D-66386 St. Ingbert / Germany
Tel.: +49 (0)6894 - 58 10 21
Fax: +49 (0)6894 - 58 10 21
E-mail: info@mt-procons.com
Internet: www.mt-procons.com

	In-Vitro-Diagnostikum		Europäischer Bevollmächtigter
	Lagerung bei		Nur zum Einmalgebrauch
	Gebrauchsanleitung beachten		Chargenbezeichnung
	Hersteller		Verwendbar bis
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Richtlinie 98/79/EC (IVDD).			